



Snel aan de slag

- 1 | Gebruikersinstellingen
- 2 | De clip gebruiken
- 3 | De Abena Nova-app gebruiken
- 4 | De clip vervangen

Abena Nova met het Wearable Sensor Platform van MediSens is bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals om op afstand het vochtniveau van een of meer incontinentieproducten te bewaken en hierover meldingen te ontvangen. Het hulpmiddel verzamelt relevante gegevens (zoals natheid van de luier, aantal en type van gebruikte luiers, reactietijd bij melding voor vervanging incontinentieproduct) of gegevens voor administratieve doeleinden binnen een klinische omgeving (bijvoorbeeld zorginstellingen) om de waardigheid van en de zorgkwaliteit aan volwassenen en kinderen met incontinentie te verbeteren.

De Abena Nova met het MediSens Wearable Platform is niet bedoeld om beslissingen te nemen met betrekking tot diagnose of therapie.

1 | Gebruikersinstellingen

A INLOGGEN EN DE CLIP ACTIVEREN

- 1 Open de app op uw mobiele telefoon door op 'WetSens Monitor' te tikken.
- 2 Log in met uw gebruikersnaam (e-mail) en uw wachtwoord.
- 3 De app kan de clip instellen als het bericht 'No clients' verschijnt of als er cliënten worden weergegeven die al eerder zijn aangemaakt.

Geen cliënten.

- 4 Beweeg de blauwe zijde van de clip over de achterkant van uw mobiele telefoon. Wanneer u een geluidssignaal hoort, is de registratie van de clip gelukt.



B DE CLIËNT INSTELLEN

- 1 Voer de naam van de bewoner in het veld 'Client' in. Selecteer het geslacht van de bewoner door op M (man) of F (vrouw) te tikken. Tik op 'Begin'.

- 2 De clip is nu geactiveerd en kan aan een nieuw Abena Nova-incontinentieproduct worden bevestigd.

2 | De clip gebruiken

A DE CLIP BEVESTIGEN

- 1 Neem de clip en een nieuw Abena Nova incontinentieproduct.




- 2 Open de clip en schuif de strip die aan het incontinentieproduct zit, in de opening van de clip. Breng daarna pas het incontinentieproduct aan bij de bewoner.


RAAK DE STRIP NIET AAN
als u deze in de clip schuift

LET OP!

De blauwe zijde van de clip moet aan de buitenkant zitten en het logo moet naar binnen wijzen.

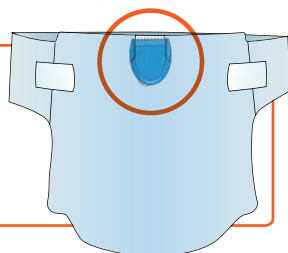

Waarschuwing - Potentieel verstikkingsgevaar. Niet gebruiken in aanwezigheid van kinderen of volwassenen met een orale fixatie.

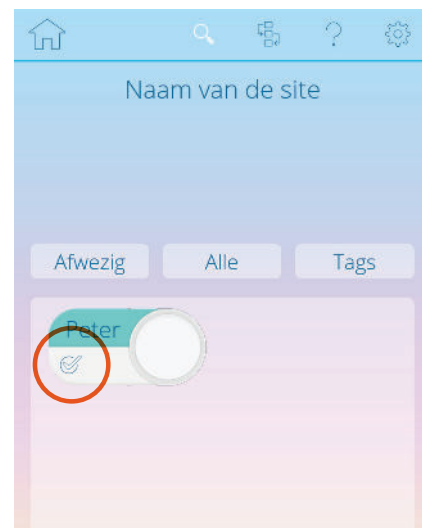


- 3 De app registreert de clip automatisch en geeft dan het volgende weer:



B DE CLIP LOSMAKEN

- 1 Open de clip en verwijder deze.

MAAK DE CLIP LOS
en breng deze alvast aan op het nieuwe incontinentieproduct.

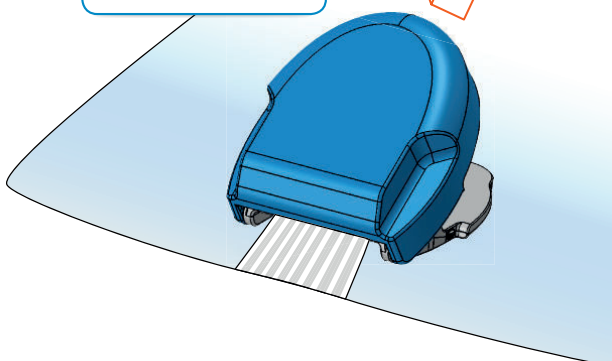

- 2 De app registreert automatisch dat de clip is verwijderd en geeft het pictogram 'Clip detached' weer.

3 | De Abena Nova-app gebruiken

A OVERZICHT VAN HET BEGINSCHERM

Wanneer u inlogt bij de app, wordt het beginscherm weergegeven.
Hieronder worden de onderdelen van het beginscherm verder beschreven.



1 NAVIGATIEBALK

- Tik hier om terug te gaan naar het beginscherm
- Tik hier om te zoeken
- Tik hier om de vier bewoners met de meest urgente status te zien, in volgorde van prioriteit.
- Tik hier voor hulp
- Tik hier om naar de instellingen te gaan

2 STATUSOVERZICHT

De Abena Nova-app gebruikt de volgende statuspictogrammen:

Statustype en -pictogram	Uitleg	Actie	Extra
RISICO OP LEKKAGE 	Het incontinentieproduct moet onmiddellijk worden verwisseld om lekkage te voorkomen.	Vervang het incontinentieproduct onmiddellijk.	Dit is een zogenaamde alarmstatus. Hiermee wordt een melding geactiveerd. De telefoon maakt dan een geluid en geeft een rood pictogram weer om u te waarschuwen.
VERSCHONING GEWENST 	Het incontinentieproduct moet binnen een uur worden vervangen voordat het volledig verzadigd is.	Vervang het incontinentieproduct zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een uur.	Dit is een zogenaamde alarmstatus. Hiermee wordt een melding geactiveerd. De telefoon maakt dan een geluid en geeft een geel pictogram weer om u te waarschuwen.
CLIP LOS 	De clip is niet aan een incontinentieproduct bevestigd.		
GEEN CONTACT 	De clip is buiten bereik van het systeem of de clip werkt niet goed.	Zorg dat de bewoner zich binnen 30 meter van het Abena Nova-bereik bevindt.	
ONBEKENDE LUIER 	Abena Nova kan het incontinentieproduct niet registreren. De strip aan het product is nat of aangeraakt.	Veeg de strip van het incontinentieproduct droog en bevestig de clip opnieuw. Gebruik een nieuw incontinentieproduct als hierna nog steeds niet de status 'OK' verschijnt.	
PROBLEEM MET CLIP 	De clip is niet goed aan de strip van het incontinentieproduct bevestigd.	Bevestig de clip opnieuw. Vervang de clip als hierna nog steeds niet de status 'OK' verschijnt - zie pagina 7.	
OK 	De clip is actief en u ontvangt meldingen voor de geregistreerde cliënt.		
NIET GEMONITORD 	De bewoner wordt niet gemonitord en u ontvangt geen meldingen voor hem/haar.	Activeer de bewoner opnieuw door diens naam 3-5 seconden lang ingedrukt te houden.	

LET OP
Abena Nova met MediSens registreert **GEEN** ontlasting. Het is dus belangrijk dat dit op de gebruikelijke manier wordt gecontroleerd.

2A OVERZICHT VAN DE STATUS VAN ALLE GEREgistREERDE CLIPS

2B HUIDIGE STATUS

Geeft de huidige status van elke geregistreerde bewoner aan. Er kunnen verschillende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van de specifieke status van de bewoner. Deze symbolen worden hieronder beschreven.



3 FILTERS


Tik op een van de drie filteropties om relevante bewoners weer te geven.

- Filter 1:** **Afwezig** Laat bewoners zien die niet worden gemonitord.
- Filter 2:** **Alle** Laat alle bewoners zien die in het systeem zijn ingesteld.
- Filter 3:** **Tags** Laat alle bewoners met een actief label zien.

3 | De Abena Nova-app gebruiken

B OVERZICHT VAN DE DETAILPAGINA

Tik tweemaal op een bewoner om de pagina met zijn of haar gegevens te openen. De detailpagina wordt hieronder verder beschreven.

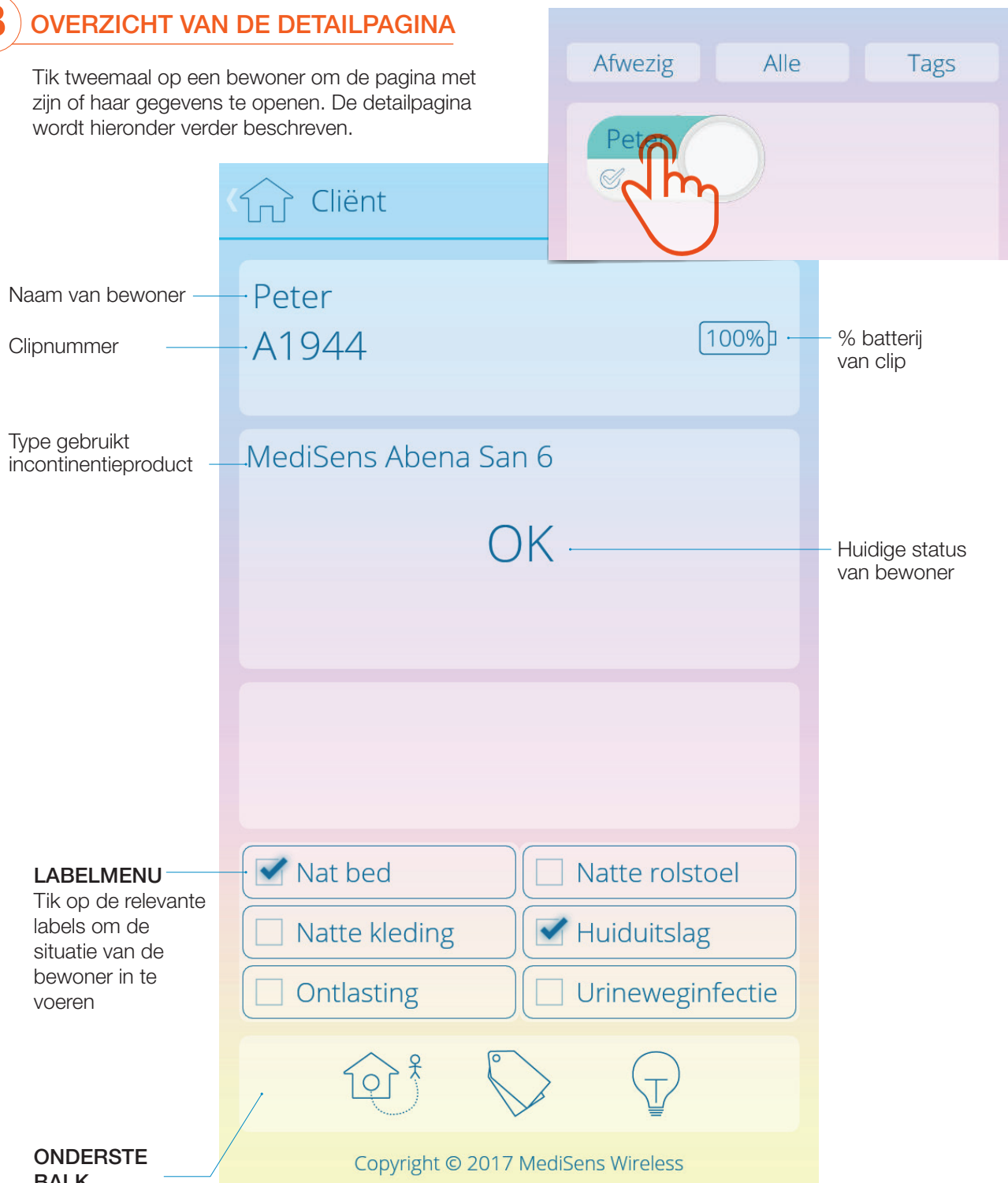

LABELMENU

Tik op de relevante labels om de situatie van de bewoner in te voeren

ONDERSTE BALK



Tik hier om meldingen voor deze bewoner uit te schakelen



Het bovenstaande labelmenu bewerken (nog niet beschikbaar)




Voorgesteld type incontinentieproduct (nog niet beschikbaar)

4 | De clip vervangen

Als de huidige clip niet functioneert of verdwenen is, activeert u met de volgende stappen een nieuwe clip.

- 1 Tik tweemaal op de bewoner die een nieuwe clip nodig heeft.

- 2 Beweeg wanneer de detailpagina wordt weergegeven, met de blauwe zijde van de clip over de achterkant van de telefoon totdat de app met een geluidssignaal aangeeft dat de clip is geregistreerd.

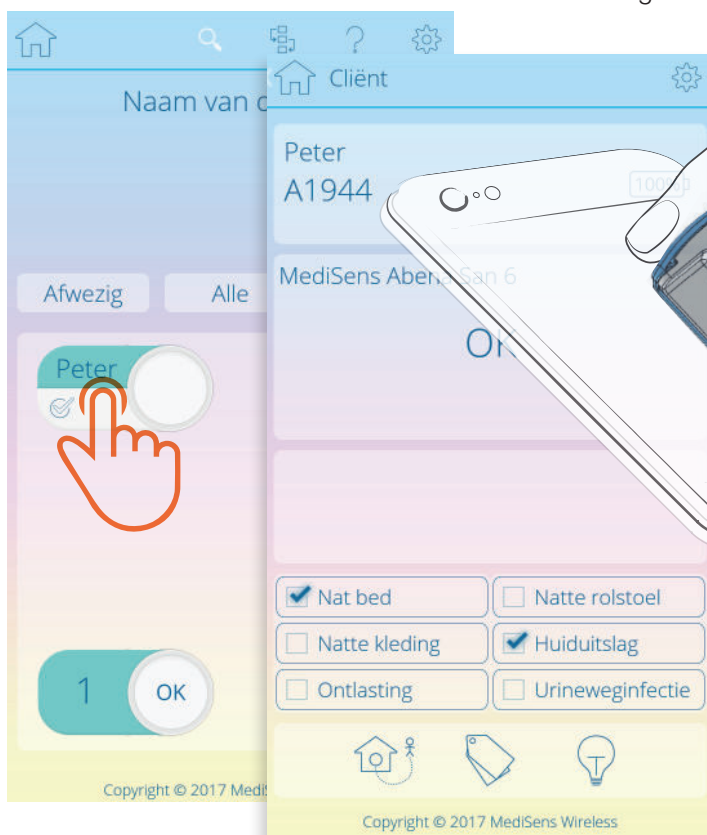

- 3 Tik op 'Ja'. De bewoner gebruikt nu de nieuwe clip.





Abena heeft als missie het leven van mensen met incontinentie te verbeteren.

Abena is een familiebedrijf dat is opgericht in 1953. Vanuit de Zuid-Deense stad Aabenraa is Abena uitgegroeid tot multinational en één van de marktleiders op het gebied van hoogwaardige producten en concepten voor de basiszorg.

De Abena Group heeft dochterondernemingen in verschillende landen, levert meer dan 25.000 verschillende producten en is in meer dan 80 landen wereldwijd.

Abena.com

MediSens Wireless, Inc. werd opgericht in 2007.
Het bedrijf heeft als doel om geavanceerde, innovatieve technologieplatforms te ontwikkelen en zinvolle zorgoplossingen te bieden aan cliënten thuis en aan zorginstellingen. Het bedrijf is gevestigd in Santa Clara, Californië (VS).

MediSens.com



Raadpleeg de MediSens-gebruikershandleiding voor meer informatie.

GENOMINEERD VOOR



WINNAAR VAN



WINNAAR VAN



WINNAAR VAN



WINNAAR VAN



AbenaNova.com

Abena Nova met MediSens™, WetSens™ en de MediSens™-logo's zijn geregistreerde handelsmerken.



De Abena Nova-clip wordt niet-steriel geleverd. Niet in een steriele zone plaatsen, in overeenstemming met het beleid van het ziekenhuis of de zorginstelling

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abena A/S mag geen enkel deel van dit document worden gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of teruggebracht tot welk elektronisch medium dan ook.

Bewaar Abena Nova op een koele, goed geventileerde plaats. Niet bewaren in een omgeving met een hoge temperatuur of een hoge luchtvochtigheid. Bewaren bij een temperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Vermijd een extreem hoge of lage luchtvochtigheid (95% of meer en 40% of minder). Een hoge temperatuur kan de levensduur van de batterij verkorten.



Abena A/S, Egelund 35, 6200 Aabenraa, Denemarken