



Slimme inco.

Hoe werk je ermee?

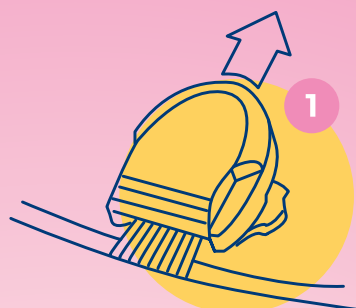


Haal de clip van de oude inco. Verwijder de oude inco.

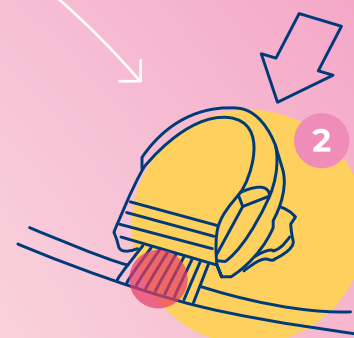

LET OP!
Raak het lipje niet aan.


Bevestig de clip aan een nieuwe inco. Laat de streepjes van de clip contact maken met de streepjes op het lipje van de inco.

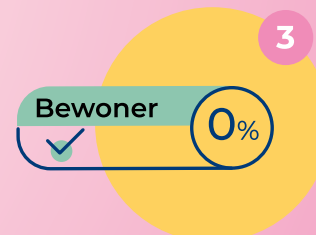

Check op de app of de clip goed zit. Je krijgt dan de groene melding OK.



Check regelmatig op de app of verschooning nodig is.

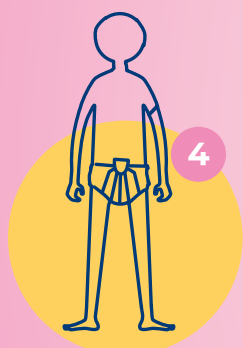


Doe de inco aan bij de cliënt.

Instructievideo Nova Form staand aanleggen



Instructievideo Nova Form liggend aanleggen

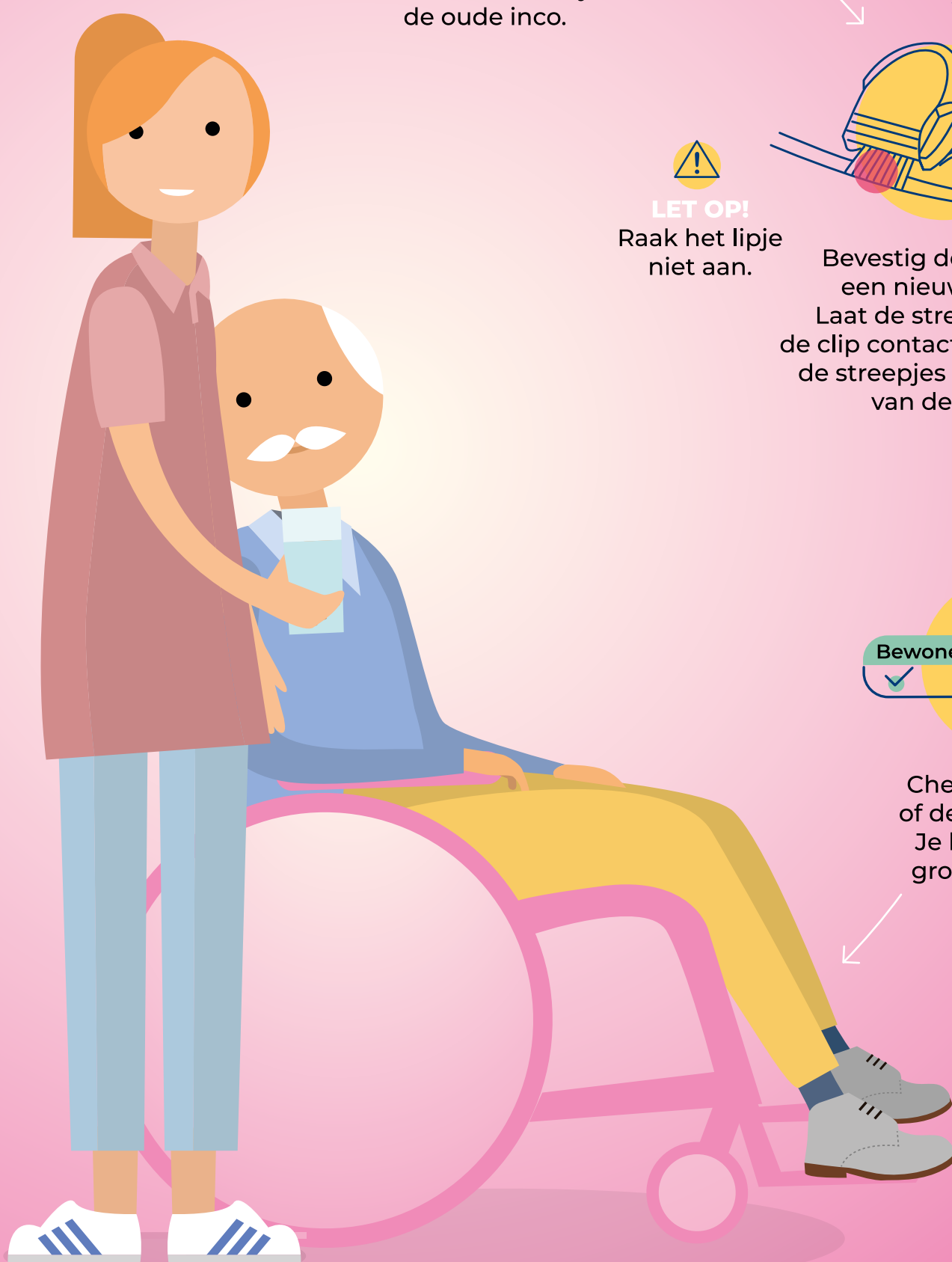

Meer weten? Neem contact op met het **Abena Adviesteam**
0485 34 34 44 | info@abena.nl

