


# Grip op het kiezen van de juiste handschoen

Het dragen van handschoenen is belangrijk bij het voorkomen van verspreiding van ziekteverwekkers. Weet jij wanneer je ze draagt en welke handschoen het meest geschikt is?

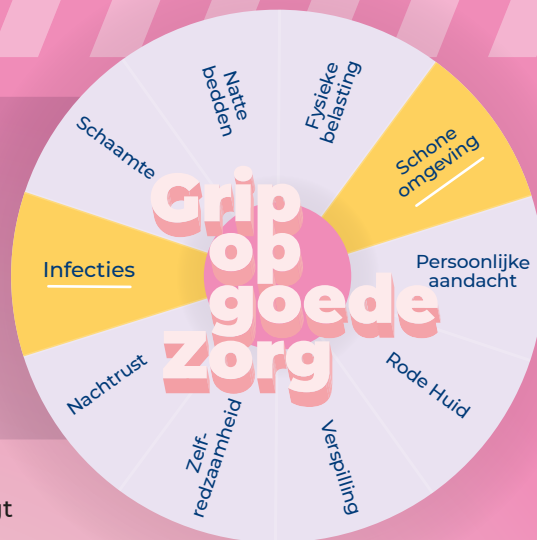

## Wanneer draag je ze?

Bij kans op contact met:

- ✓ Lichaamsvloeistoffen
- ✓ Slijmvliezen
- ✓ Niet-intacte huid
- ✓ Specifieke micro-organismen
- ✓ Bij een speciale indicatie

## Welke handschoenen zijn er?

- ✓ Nitril handschoenen
- ✓ Latex handschoenen
- ✓ Vinyl handschoenen

*Op de achterzijde een overzicht van toepassingen en welke handschoen daarvoor geschikt is.*



## Wanneer verwissel je ze?

- ✓ Tussen twee handelingen in als de volgende handeling schoner is dan de vorige
- ✓ Na contact met de cliënt
- ✓ Voor het verlaten van de ruimte
- ✓ Direct als deze zichtbaar vies, kapot of nat zijn

## Antimicrobiële handschoenen

De beste keuze op het gebied van infectiepreventie. Doodt 99,9% van alle bacteriën.

NIEUW

LET OP!



Vinyl handschoenen zijn **niet geschikt** voor alle zorghandelingen!

Meer weten? Neem contact op met het **ABENA Adviesteam**  
**0485 58 11 50** |  
**support@abena.nl**



## De juiste handschoen voor iedere toepassing:

| Toepassingen                         | Beste Keuze                   |       |       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                                      | Nitril                        | Latex | Vinyl |
| Clïëntenzorg                         | A                             | A     | G     |
| Lichaamsvloeistoffen                 | A                             | A     | NG    |
| Cytostatica (chemotherapie)          | A                             | NG    | NG    |
| Oliegebaseerde / hormonale crèmes    | A                             | NG    | NG    |
| Lichte schoonmaakwerkzaamheden       | A                             | A     | G     |
| Bescherming tegen chemische middelen | Vraag uw ABENA contactpersoon |       |       |
| Contact met levensmiddelen           | A                             | A     | G     |

- A** Aanbevolen
- G** Geschikt
- NG** Niet Geschikt

**Advies:** Voor de meest voorkomende zorg-handelingen adviseren wij Classic Nitril handschoenen en antimicrobiële handschoenen. Bij zorghandelingen waarbij de kans bestaat dat lichaamsvloeistoffen in de handschoen lopen, zoals bij uitscheidingsproducten, adviseren wij handschoenen met een lang manchet.

### ABENA's assortiment Nitril handschoenen:

#### Classic Nitril antimicrobieel, poedervrij

| Artikelnr. | Maat | Z-indexnr. |
|------------|------|------------|
| 1000010125 | XS   | 16.801.989 |
| 1000010126 | S    | 16.802.004 |
| 1000010127 | M    | 16.802.012 |
| 1000010128 | L    | 16.802.039 |
| 1000010129 | XL   | 16.802.047 |

#### Classic Nitril, poedervrij

| Artikelnr. | Maat | Z-indexnr. |
|------------|------|------------|
| 290417     | XS   | 15.708.241 |
| 290418     | S    | 15.708.225 |
| 290419     | M    | 15.708.217 |
| 290420     | L    | 15.708.209 |
| 290421     | XL   | 15.708.233 |

#### Excellent Nitril, poedervrij, lang manchet

| Artikelnr. | Maat | Z-indexnr. |
|------------|------|------------|
| 290431     | XS   | 15.973.786 |
| 3924       | S    | 15.973.794 |
| 3925       | M    | 15.973.808 |
| 3926       | L    | 15.973.816 |
| 3927       | XL   | 15.973.824 |

Voor het beste advies & informatie over onze producten, kijk op [abena-professional.nl/healthcare](https://abena-professional.nl/healthcare)

