



ABENA[®]
Nova
with MediSens[®]



Alles wat u wilt weten over ABENA Nova

Het slimme incontinentiemateriaal



8 718503 547503

REF741191

Incontinentie heeft een grote impact op iemands leven. Gelukkig zijn er nieuwe technologieën, die bijdragen aan betere continenzorg. Zoals het slimme incontinentiemateriaal ABENA Nova.

Wat is ABENA Nova?

ABENA Nova is het eerste slimme incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik. Er zitten sensoren in, waarmee het vochniveau continu wordt gemeten. Hierdoor kunnen zorgverleners exact het ideale moment van verschonen bepalen.

Hoe werkt het?

De sensoren registreren precies hoeveel vocht het incontinentiemateriaal heeft opgenomen. Zorgverleners zien vervolgens via een app op hun telefoon wat het beste moment is om iemand te verschonen.




 Data

1

In het incontinentiemateriaal zitten sensoren, waaraan een kleine clip bevestigd wordt.

Zo kunnen zij de verschoningen en toilettijden voor iedereen op exact de juiste momenten plannen. Niet te vroeg, en zeker niet te laat.

2

De sensoren registreren het vochniveau en geven dit via een draadloze verbinding door aan de ABENA Nova app op de telefoon van de zorgverlener.

Inzicht

3

De zorgverlener kan het vochniveau via de app volgen en de zorg hierop afstemmen.

Zorg

Welke voordelen biedt ABENA Nova?



Zorgverleners zien precies wanneer het incontinentiemateriaal verzadigd is en vervangen moet worden. Hierdoor loopt u niet het risico dat u te laat verschoond wordt. Dat minimaliseert de kans op lekkages en huidirritatie.

Aan de andere kant wordt u ook niet te vroeg verschoond. Daardoor kunt u 's nachts beter doorslapen. En wordt u minder fysiek belast vanwege een verschooning die eigenlijk niet nodig was.



Veelgestelde vragen over ABENA Nova

Word ik pas verschoond als het incontinentiemateriaal volledig verzadigd is?

Met de ABENA Nova wordt gekeken naar het beste verschoonmoment, niet te vroeg en niet te laat. We hebben incontinentiematerialen in diverse typen, maten en absorpties. Zorgverleners kijken welk product het meest geschikt is voor dragen op de dag en in de nacht.

Wat is het bereik van de clip?

Ongeveer 10 meter. Voor een goed bereik kunnen zorginstellingen op allerlei plekken zogeheten 'relays' * plaatsen. Die pakken het signaal overal op en sturen het door naar de app.

Ik wil op het terras een kopje koffie drinken. Wordt het vochniveau dan nog wel geregistreerd?

De sensoren in het incontinentiemateriaal blijven het vochniveau doorgeven aan de clip, ook als u buiten het bereik van een relay bent. Zodra de clip weer binnen het bereik van een relay komt, wordt het vochniveau doorgestuurd naar de app.

Kan ik ABENA Nova ook alleen voor de nacht gebruiken?

Jazeker. Als u overdag geen incontinentieproduct draagt maar 's nachts wel, dan kunt u daarvoor ook ABENA Nova gebruiken.

Hoe zit het met mijn persoonsgegevens? Zijn deze beveiligd?

Uw persoonsgegevens staan geanonimiseerd in de app. Deze is goed beveiligd en voldoet aan de AVG regels. Het is niet mogelijk om de app buiten de zorginstelling of op uw eigen telefoon te downloaden.

Ik wil een bezoekje brengen aan mijn familie. Moet ik een extra incontinentieproduct meenemen?

Besprek dit met uw zorgverlener. Samen kunt u bijvoorbeeld bepalen of het mogelijk is om kort voor uw vertrek een verschooning te plannen. Ook kunt u samen bepalen of het verstandig is om nog een extra incontinentieproduct mee te nemen.

Kan ABENA Nova ook ontlasting registreren?

Nee, op dit moment nog niet. Maar in de nabije toekomst mogelijk wel. Wij testen nu de mogelijkheid om ontlasting via geurdetectie te registreren.

Staat uw vraag er niet bij? Of wilt u meer weten over ABENA Nova? Kijk dan op abena-nova.nl.

Of neem contact op met het Nova support team. Bel 0485 58 11 40 of mail supportnova@abena.nl.

* De sensoren in ABENA Nova hebben een bereik van ongeveer 10 meter. Via zogeheten 'relays' kunnen de sensoren overal in een zorginstellingen informatie doorsturen naar de app.